

COUSSINETS PLANTAIRES **NOUVELLE GÉNÉRATION** **COMFORTACT™ PLUS**



COUSSINET BREVETÉ* = PLUS DE CONFORT

TISSU DOUX ET FIN
> Confort et évacuation de la sueur

MODULE DE GEL SILICONE
> Répartit les pressions et soulage les douleurs

EFFET "BILLES"
> Accueille le pied confortablement

BRETELLE GALBÉE
> Confort entre les orteils

TISSU SOUPLE
> Résiste à l'usure de contact avec la chaussure

*Les coussinets COMFORTACT™ PLUS sont issus d'une conception innovante et font l'objet d'un dépôt de brevet.

INDICATIONS :

Les coussinets COMFORTACT™ PLUS protègent l'avant-pied en limitant les pressions et soulagent les douleurs.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas utiliser sur une lésion cutanée. Cas des personnes souffrant d'artérite, de diabète, de polyneuropathie, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères : demander conseil à votre médecin ou à votre podologue, puis surveiller votre pied pendant l'utilisation.

SPÉCIFICITÉS :

Ultra-confortable, la bretelle ergonomique épouse les courbes naturelles du gros orteil pour limiter les risques d'irritations interdigitales. En zone plantaire, un module en gel de silicone EPITHELIUM 26 à effet « billes » a été spécialement développé pour accueillir confortablement l'avant-pied et répartir les pressions.

ERGONOMIE :

Grâce au patronnage exclusif et à l'élasticité constante du tissu, la tenue sur le pied est optimisée. De plus, la finesse des coussinets rend possible le port de chaussures étroites et permet de limiter les effets d'instabilité lors de la marche.

DURÉE DE VIE :

Lavable en machine à 30°C dans le filet de lavage fourni.

COMPOSITION :

84 % Silicone, 16 % tissu polyamide/élasthanne.

Les matériaux ont fait l'objet d'une évaluation de la biocompatibilité selon la norme ISO 10993-1. Si un incident se produisait, il conviendrait de cesser immédiatement l'utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation. La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2020.



 Lavable en machine à 30°C	 Pas de repassage, ni de vapeur.	 Pas de nettoyage à sec.
 Pas de chlorage.	 Pas de séchage en machine.	 Voir emballage.

Produit issu de la recherche MILLET Innovation.

 MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Loriol/Drôme - FRANCE

**MILLET
INNOVATION**

www.epitact.com