



Masque barrière UNS 2 EPITACT®


NOTICE D'UTILISATION



AVERTISSEMENT

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

- Portez ce masque quand vous êtes **en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.**
- Vérifiez toujours que le masque est **bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.**
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- **Ce masque ne remplace pas les gestes barrières** (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). **Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.**

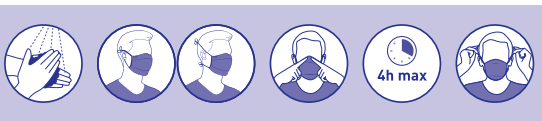

A

B ou C

D

E

F

2 options de mise en place

DÉCOMPTÉ D'UTILISATION DES MASQUES

Les masques pouvant être lavés 50 fois, chaque masque est donc utilisable 51 fois. Pour vous aider à suivre et gérer le décompte d'utilisation de vos masques, veuillez renseigner le tableau suivant en cochant les cases :

MASQUE 1	Utilisation 01
	Utilisation 02
	Utilisation 03
	Utilisation 04
	Utilisation 05
	Utilisation 06
	Utilisation 07
	Utilisation 08
	Utilisation 09
	Utilisation 10
	Utilisation 11
	Utilisation 12
	Utilisation 13
	Utilisation 14
	Utilisation 15
	Utilisation 16
	Utilisation 17
	Utilisation 18
	Utilisation 19
	Utilisation 20
	Utilisation 21
	Utilisation 22
	Utilisation 23
	Utilisation 24
	Utilisation 25
	Utilisation 26

MASQUE 1	Utilisation 27
	Utilisation 28
	Utilisation 29
	Utilisation 30
	Utilisation 31
	Utilisation 32
	Utilisation 33
	Utilisation 34
	Utilisation 35
	Utilisation 36
	Utilisation 37
	Utilisation 38
	Utilisation 39
	Utilisation 40
	Utilisation 41
	Utilisation 42
	Utilisation 43
	Utilisation 44
	Utilisation 45
	Utilisation 46
	Utilisation 47
	Utilisation 48
	Utilisation 49
	Utilisation 50
	Utilisation 51

Réf. 19559-A • 07/2020



Pas de chantage.



Séchage en machine jusqu'à 60°C.



OT Voir emballage.



FABRICANT : MILLET Innovation 309
allée des Lavandes Z.A. Champgrand
26270 LORRIOL-SUR-DROME

www.epitact.fr

COMMENT PORTER LE MASQUE ?

Avant de le mettre :

1. Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon (Schéma A) ou une solution hydroalcoolique.
2. Inspectez le masque et assurez-vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations.
3. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.
4. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.

Pour le mettre :

Le masque vous est fourni avec les lanières élastiques nouées de façon à pouvoir les positionner derrière les oreilles (Schéma B). Il est possible de les nouer différemment pour pouvoir les passer derrière la tête (Schéma C). Pour cela, dénouez les lanières côté gauche puis côté droit. Ensuite, nouez ensemble les lanières supérieures puis nouez ensemble les lanières inférieures.

1. Tenez le masque par les lanières élastiques.
2. Placez-le au niveau de votre bouche.
3. Passez les lanières élastiques derrière les oreilles (Schéma B) ou derrière la tête (Schéma C).
4. Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton : vérifiez que la pièce en silicone est positionnée sur l'arête du nez.

Lorsque vous le portez :

1. Évitez de le toucher et de le déplacer.
2. Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

Il faut changer le masque :

1. Quand vous avez porté le masque 4h.
2. Quand vous souhaitez boire ou manger.
3. Quand il devient difficile de respirer.
4. Si le masque s'humidifie.
5. Si le masque est endommagé.
6. Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

Pour l'enlever :

1. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.
2. Décrochez les lanières élastiques pour décoller le masque de votre visage.
3. En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique.
4. Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.
5. Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.

COMMENT ENTRETENIR LE MASQUE ?

Avant ouverture :

Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre -2°C et + 55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

Pour le lavage :

1. Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins 30 min à 60°C minimum. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge si celui-ci est de couleur foncée.
2. Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.
3. Ce masque a été testé pour 50 lavages. Après 50 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie.
4. Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en forme.

Après le lavage :

1. Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches).
2. Pour cela, vous pouvez : utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), utiliser un sèche-cheveux, ou encore faire sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté.
3. Repassez votre masque à la vapeur à 120°C.
4. Dès que le masque est sec, stockez-le dans le sachet argenté fourni.

SÉCURITÉ

1. Ce masque a démontré une efficacité de filtration supérieure à 70 % pour des particules de 3 microns émises par la personne portant le masque.
2. La respirabilité du masque a été mesurée à $> 96 \text{ L.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$ et doit permettre son port pour une durée de 4h.

AVERTISSEMENT

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.