


ORTHÈSE POIGNET SOUPLE D'ACTIVITÉ CARP'ACTIV™

ACCOMPAGNE LE MOUVEMENT DU POIGNET

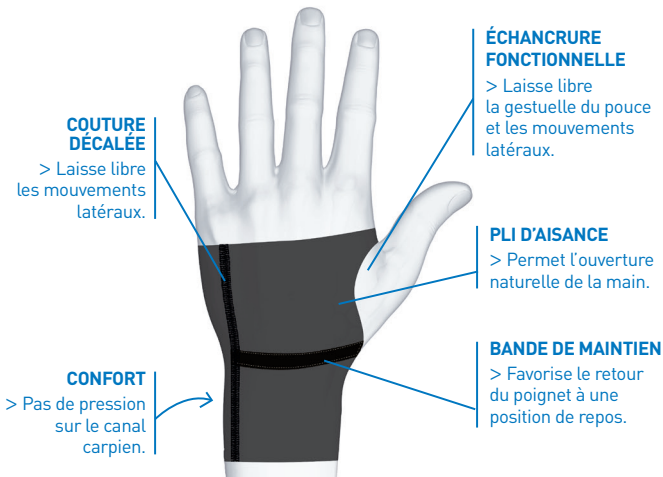

INDICATIONS :

Le port de l'orthèse souple d'activité CARP'ACTIV™ est préconisé lors de vos activités quotidiennes en cas de syndrome du canal carpien, de troubles musculo-squelettiques ou de tendinites du poignet.

CONTRE-INDICATIONS :

L'orthèse ne doit pas être mise en contact avec une lésion cutanée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Déconseillée lors d'une utilisation prolongée sur clavier.

SPÉCIFICITÉS :

L'orthèse est conçue pour accompagner les mouvements de votre poignet tout en conservant l'usage de vos doigts. CARP'ACTIV™ limite l'amplitude et évite les arrêts brusques dans le geste.

ERGONOMIE :

Grâce à son tissu technique et à son patronnage spécifique épousant le galbe de la main, l'orthèse souple apporte une présence sécurisante et un confort optimal.

DURÉE DE VIE :

Lavable en machine dans le filet de lavage fourni, elle a une longue durée d'utilisation (plusieurs mois).

COMPOSITION :

100% tissu polyamide/élasthanne.
Les matériaux ont fait l'objet d'une évaluation de la biocompatibilité selon la norme ISO 10993-1. Si un incident se produisait, il conviendrait de cesser immédiatement l'utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation. La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2018.



Lavable en machine à 30°C



Pas de repassage, ni de vapeur.



Pas de nettoyage à sec.



Pas de chlorage.



Pas de séchage en machine.



Voir emballage.

Produit issu de la recherche MILLET Innovation.



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Loriol/Drôme - FRANCE



MILLET
INNOVATION

www.epitact.com