

ORTHÈSE DOIGT RIGIDE DE REPOS



IMMOBILISE ET SOULAGE LE DOIGT



INDICATIONS :

Durant la nuit ou dans toutes les situations où vous n'utilisez pas votre main, le port régulier de l'orthèse de repos EPITACT® aide à soulager les douleurs articulaires à la base du doigt et contribue à limiter l'évolution de la rhizarthrose.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

En cas d'œdème sévère : surveiller la main pendant l'utilisation. Ôter le dispositif si le serrage est trop important et entrave la circulation. En cas de doute, demander conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Ne pas appliquer de crème ou de pommade avant l'application de l'orthèse.

Ne pas utiliser à côté d'une flamme ou d'un corps incandescent.

SPÉCIFICITÉS :

L'orthèse EPITACT® immobilise le doigt en position de repos en ouvrant la commissure entre l'index et le doigt. L'alignement des os limite les forces s'exerçant sur l'articulation trapézo-métacarpienne et soulage la douleur.

ERGONOMIE :

Grâce à ses renforts modélisés pour s'adapter parfaitement à la morphologie de votre main, l'orthèse d'immobilisation vous offre un confort optimal. Légère et ultra fine, elle se fait oublier lorsque vous la portez.

CONSEILS :

En complément de l'orthèse de repos rigide, nous vous recommandons de porter l'orthèse d'activité souple EPITACT® dans toutes les situations où vous avez besoin d'utiliser votre main.

ENTRETIEN :

Lavage à la main à 30°C, avec un savon non agressif sans détergent ni eau de javel. Bien rincer. Essorer par pression. Ne pas exposer au séchage à une source de chaleur directe (radiateur, rayons de soleil). Ne pas utiliser de détachant.

COMPOSITION : 57% textile (Polyamide, Elasthanne, Polyuréthane), 43% Plastique thermoformable TPE.

Les matériaux ont fait l'objet d'une évaluation de la biocompatibilité selon la norme ISO 10993-1. Si un incident se produisait, il conviendrait de cesser immédiatement l'utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation. La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant.

Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2017.



Lavable à la main.



Pas de repassage, ni de vapeur.



Pas de nettoyage à sec.



Pas de chlorage.



Pas de séchage en machine.



LOT Voir emballage.

Produit issu de la recherche MILLET Innovation.



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Lorio/Drôme - FRANCE

MILLET
INNOVATION

www.epitact.be

NI 9458E-FR-A
01/2018