

DOIGTIER à l'EPITHELIUM 26®

INDICATIONS

Prévenir et soulager les douleurs à l'extrémité des orteils : cor pulpaire, ongle bleu, ongle incarné...

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.
- Cas de personnes souffrant d'artérite, de diabète, de polynévrite, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères : demander conseil à votre médecin ou à votre podologue, puis surveiller votre pied pendant l'utilisation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Laver avant la 1^{ère} utilisation.
- Pour une mise en place facile, positionner le doigtier à l'envers, à l'extrémité du doigt ou de l'orteil, puis le dérouler progressivement.
- Ne pas raccourcir le doigtier, cela nuit à sa solidité.
- Enlever le doigtier chaque soir pour éviter les risques de macération.

FONCTIONNALITÉS

- Breveté par des podologues, l'EPITHELIUM 26® est un gel silicone dont les propriétés de répartition des pressions sont proches de celles des tissus sous-cutanés. La présence de ce matériau dans les Doigtiers permet d'éviter la formation de cors pulpaire et de soulager la douleur lorsque les callosités sont déjà formées.

De plus, les doigtiers sont particulièrement efficaces en prévention des ongles bleus ou des ongles incarnés.

- L'insertion du gel d'EPITHELIUM 26® entre 2 couches de tissu augmente la durée de vie des doigtiers.

ENTRETIEN

- Laver en machine à 30°C dans le filet de lavage fourni ou à la main (sans frotter).
- Laisser sécher naturellement. Ne pas repasser.

COMPOSITION : 62 % silicone, 38% tissu polyamide/élasthanne.

Les matériaux ont fait l'objet d'une évaluation de la biocompatibilité selon la norme ISO 10 993-1 concernant les produits venant en contact avec la peau. Si un incident se produisait, il conviendrait de cesser immédiatement l'utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2001.

Ref.: 10076-N_04/2021

