



PHYSIOstrap® SPORT

epitact®


EPITHELIUMFLEX® 01

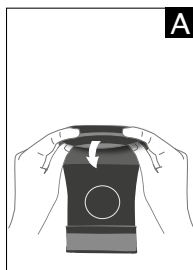


A

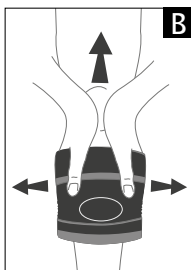


B

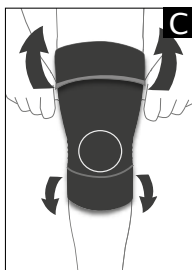

C

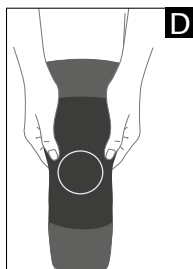

D

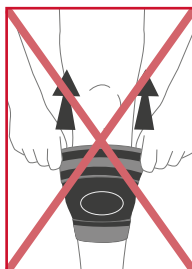

Ne pas tirer. / Do not stretch. / Nicht nach oben ziehen. / Non tirare. / No tirar. / Niet trekken. / Não puxe. / Træk ikke. / Älä vedä. / Dra inte. / Ikke trekk i knebeskytteren. / Μην τραβάτε.

FR MISE EN PLACE

- Replier les élastiques du PHYSIOstrap® vers l'extérieur.
- Enfiler les mains dans le PHYSIOstrap® et positionnez le «tendon» centré sur la rotule.
- Déplier les élastiques **sans tendre le PHYSIOstrap® sur votre jambe.**
- Ajuster le PHYSIOstrap® en position debout **et s'assurer que le tendon est bien positionné à plat.**

INDICATIONS : Le port du PHYSIOstrap® EPITHELIUMFLEX®01 aide à soulager les pathologies rotuliennes (syndrome rotulien, instabilité rotulienne, tendinopathie rotulienne...). Dans le cas d'un traumatisme du genou ayant entraîné des séquelles (fragilité des ligaments, arthrose...), il contribue à la stabilité de l'articulation lors de la reprise des activités sportives.

CONTRE-INDICATIONS : Ne pas utiliser en cas d'artérite, d'état variqueux important, de séquelles de phlébite ou d'œdème (lymphatique/veineux) de la jambe et/ou de la cuisse de manière à ne pas entraver la circulation. Ne pas utiliser avec un bas de contention. Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Pour éviter tout risque d'irritation générée par les bandes élastiques siliconées, le PHYSIOstrap® ne doit pas être porté en statique, notamment en position allongée (sommeil), ou assise (y compris déplacement en car, voiture...). Le PHYSIOstrap® doit être enfilé juste avant votre activité pour être porté uniquement en dynamique lors de la pratique sportive.
- Si vous utilisez des manchons de compression au niveau des mollets de type «Booster», placez la bande élastique inférieure du PHYSIOstrap® par-dessus le manchon.
- Disposer le PHYSIOstrap® sur la cuisse sans le tendre.

TENUE :

- Ne pas appliquer de cosmétiques hydratants avant l'utilisation du PHYSIOstrap® afin de garantir une tenue optimale.
- Si vous rencontrez des problématiques de tenue en cas de situations extrêmes (sports à accélérations et décélérations rapides, courses à fort dénivelé ou de longue distance, température élevée), nous vous recommandons de porter un cuissard par-dessus le PHYSIOstrap®.
- Pour garantir une bonne tenue, il est nécessaire de laver le produit avant chaque utilisation. A minima, laver les bandes élastiques siliconées avec de l'eau et du savon (sans frotter) pour enlever toutes les impuretés.

SPÉCIFICITÉS : Le PHYSIOstrap® agit en dynamique sans entraver le mouvement. Il peut donc être utilisé en prévention car il préserve le capital musculaire.

ERGONOMIE : Concentré de technologie dans moins de 60 g, le PHYSIOstrap® EPITHELIUMFLEX®01 a été spécialement conçu pour le sport. Le PHYSIOstrap® EPITHELIUMFLEX®01 est conçu pour être porté indifféremment sur le genou droit ou gauche. Il ne glisse pas et ne provoque aucune gêne derrière le genou (pli poplité). Extra fin, il peut se porter sous tous types de vêtements.

ENTRETIEN : Laver après utilisation. Laver en machine à 30°C ou à la main (sans frotter), laisser sécher naturellement. Ne pas repasser. Jeter et remplacer le dispositif dès l'apparition de fissures dans le gel ou de dégradation du tissu ou des coutures.

COMPOSITION : 70% tissu polyamide/élasthanne, 30% silicone.

En cas de douleurs ou de toute autre réaction inhabituelle, contacter votre médecin. Le tendon silicone en contact peau peut générer des irritations mécaniques, telles des ampoules (< 0.1 %). Tout incident grave survenu en rapport avec le produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de santé.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2014.



Lavable en machine à 30°C.



Pas de repassage, ni de vapeur.



Pas de nettoyage à sec.



Pas de chlorage.




Pas de séchage en machine.



VOIR emballage.

PATENTED TECHNOLOGY

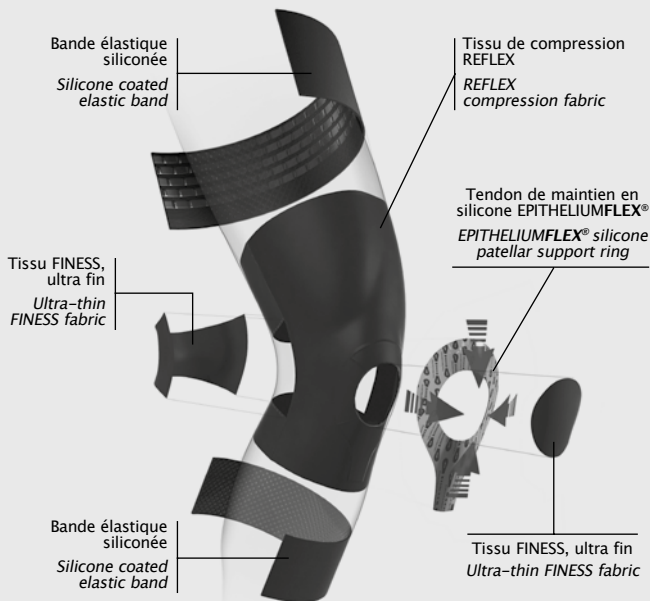

CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE DANS MOINS DE 60g
CONCENTRATED TECHNOLOGY WEIGHING LESS THAN 60g

DÉCOUVREZ LA GAMME EPITACT® SPORT:
DISCOVER THE EPITACT® SPORT RANGE:



Produit issu de la recherche MILLET Innovation.
Product designed by MILLET Innovation R&D.



www.epitact.com