

ORTHÈSE CORRECTIVE SOUPLE DE JOUR HALLUX VALGUS

INDICATIONS

Aide à corriger l'hallux valgus tout en soulageant les douleurs articulaires.

CONTRE-INDICATIONS


- Gros orteil non mobile.
- Ne pas appliquer sur une peau lésée.
- En cas d'artérite, de diabète, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères, demander conseil à votre médecin ou à votre podologue puis surveiller régulièrement le pied.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- **Avant tout, vérifier que le gros orteil peut encore bouger latéralement lorsqu'on le manipule. Si ce n'est pas le cas, ne pas utiliser ce dispositif.**
- **Ne pas utiliser ce produit durant la nuit.**
- **L'orthèse peut être portée indifféremment sur le pied droit ou le pied gauche.**
- **Laver avant la 1^{ère} utilisation.**

MISE EN PLACE :

- Passer l'avant-pied dans le bracelet.
- Encapuchonner ensuite le gros orteil.
- Placer la pastille en EPITHELIUM™ (a) en arrière de l'oignon (b).
(Voir schéma 1)

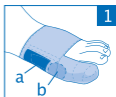

- RÉGLAGE :

- **Le premier jour, ne pas essayer de corriger le gros orteil.**
- Pendant 10 jours, **corriger progressivement** le gros orteil en tirant le dispositif vers l'arrière. (Voir schéma 2)



Le dispositif doit être porté quotidiennement pour obtenir une efficacité optimale.

ENTRETIEN

- Laver après utilisation en machine à 30°C dans le filet de lavage fourni ou à la main (sans frotter).
- Jeter et remplacer le dispositif dès l'apparition de fissures dans le gel ou de dégradation du tissu ou des coutures
- Laisser sécher naturellement. Ne pas repasser.

COMPOSITION : 58 % silicone, 42 % tissu polyamide/élasthanne.

En cas de douleurs ou de toute autre réaction inhabituelle, contacter votre médecin. Le tendon silicone en contact peau peut générer des irritations mécaniques, telles des ampoules (< 0.1 %). Tout incident grave survenu en rapport avec le produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de santé.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2011.

Réf. 10448-O_05/2023



 Lavable en machine à 30°C.

 Pas de chlorure.

 Pas de repassage, ni de vapeur.

 Pas de séchage en machine.

 Pas de nettoyage à sec.

 Voir emballage.

