



## PROTÈGE-POINTES PLANTAIRES à l'Epithelium 26®

NOTICE D'UTILISATION  
DIRECTIONS FOR USE



Réf. 10624-C\_05/2023



**MILLET**  
INNOVATION



MILLET Innovation ZA Champgrand  
26270 Loriol/Drôme-FRANCE

[contact@epitact.com](mailto:contact@epitact.com)  
[www.epitact.com](http://www.epitact.com)

# PROTÈGE-POINTES PLANTAIRES

## à l'Epithelium 26®

L'Epithelium 26® est un gel silicone breveté dont les caractéristiques mécaniques sont proches de celles du capiton plantaire naturel.

### INDICATIONS

Prévenir et soulager les douleurs sous l'avant-pied : vieillissement du capiton plantaire, durillons, station debout prolongée.

### CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas appliquer sur une peau lésée.
- En cas d'artérite, de diabète, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères, demander conseil à votre médecin ou à votre podologue puis surveiller régulièrement le pied.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Laver avant la 1<sup>ère</sup> utilisation.
- Les porter à même la peau pour un confort optimal (sauf sur une plaie non protégée) sous un bas, un collant ou une chaussette.
- Glisser le pied dans le protège-pointes :
  - la partie imprimée du tissu doit être en contact avec la plante de votre pied. Ne pas retourner.
  - la couture à l'extérieur du pied doit remonter légèrement sur le dessus du pied (voir schéma).
- Enfiler ensuite chaussettes, bas ou collant par-dessus pour un meilleur maintien.

### ENTRETIEN

- Laver après utilisation en machine à 30°C dans le filet de lavage fourni ou à la main (sans frotter).
- Jeter et remplacer le dispositif dès l'apparition de dégradation du tissu ou des coutures.
- Laisser sécher naturellement. Ne pas repasser.

### COMPOSITION : 69 % silicone, 31% tissu polyamide/élasthanne.

En cas de douleurs ou de toute autre réaction inhabituelle, contacter votre médecin. Tout incident grave survenu en rapport avec le produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de santé.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2003.



Lavable en machine  
à 30°C.



Pas de repassage,  
ni de vapeur.



Pas de nettoyage  
à sec.



Pas de chlorage.



Pas de séchage  
en machine.



Voir emballage.