

## SÉPARATEURS à l'EPITHELIUM™

### INDICATIONS

Pour séparer deux orteils entre lesquels s'exercent des pressions et des frottements excessifs.

### CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.
- Cas de personnes souffrant d'artérite, de diabète, de polynévrite, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères: demander conseil à votre médecin ou à votre podologue, puis surveiller votre pied pendant l'utilisation.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Laver avant la 1<sup>ère</sup> utilisation.
- Placer 1 séparateur entre les orteils. La partie plate se place contre le cor.  
Remarque : Pour séparer fortement deux orteils :  
- Positionner deux séparateurs l'un contre l'autre  
- Placer l'assemblage obtenu entre les orteils.
- Après excision du cor interdigital par le podologue, et cicatrisation, un séparateur est mis en place. Ce dispositif permet d'éviter la reformation systématique du kérate. La partie la plus large peut se placer indifféremment en haut ou en bas. Choisissez selon le confort ressenti.

### FONCTIONNALITÉS

- Le séparateur permet d'écarter les orteils de quelques millimètres. Il est réalisé en EPITHELIUM™ dont les propriétés de répartition des pressions et d'inhibition des frottements sont remarquables.
- Le matériau souple et la forme du séparateur, en adéquation avec le pied, procurent un confort immédiat.

### ENTRETIEN

- Laver après utilisation. Les protections sont lavables à l'eau et au savon.
- Jeter et remplacer le dispositif dès l'apparition de fissures dans le gel.
- Ne pas frotter et laisser sécher à l'air libre.

**COMPOSITION** : 100 % silicone.

En cas de douleurs ou de toute autre réaction inhabituelle, contacter votre médecin. Le silicone en contact peau peut générer des irritations mécaniques, telles des ampoules (< 0.1 %). Tout incident grave survenu en rapport avec le produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de santé.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant.

Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2004.

Réf. 10738-O\_05/2023



Lavable à la main.



Pas de repassage, ni de vapeur.



Pas de nettoyage à sec.



Pas de chlorage.



Pas de séchage en machine.



Voir emballage.



MILLET  
INNOVATION



MILLET Innovation ZA Champgrand  
26270 Loriol/Drôme - FRANCE

contact@epitact.com  
www.epitact.com