

PROTECTIONS HALLUX VALGUS “OIGNON” à l'Epithelium™ Activ

INDICATIONS

Pour protéger l'hallux valgus (« oignon ») et soulager efficacement les douleurs en limitant les frottements excessifs.

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.
- En cas de réaction allergique ou de réaction irritative importante, arrêter l'utilisation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les protections doivent être utilisées sur une peau propre et sèche.

- Sortir une protection de la pochette métallisée.
- Retirer avec précaution le film protecteur qui recouvre la face collante.
- Appliquer cette face adhésive sur la peau en prenant soin de bien recouvrir la zone de l'hallux valgus.
- Exercer une légère pression sur la protection pour parfaire l'adhésion sur le pied.
- Enfiler délicatement vos chaussettes, bas ou collants.
- Garder le dispositif en place durant la journée.
- Enlever la protection pour la nuit, la déposer sur l'étui de rangement prévu à cet effet et la placer dans le sachet métallisé jusqu'au lendemain.

Il est conseillé d'appliquer la protection quotidiennement pour obtenir une efficacité optimale.

FONCTIONNALITÉS

- Ces protections auto-adhésives soulagent grâce au **gel d'Epithelium™ Activ qui répartit les pressions et diminue les frottements à l'origine des douleurs.**
- Très efficaces tout en étant très fines, les protections peuvent être utilisées dans toutes les chaussures (ville, sport, maison...) sans introduire de pressions supplémentaires.

Ces protections ont été testées et validées sur une population diabétique.

ENTRETIEN

- Laver après utilisation. Les protections sont lavables à l'eau et au savon.
- Jeter et remplacer le dispositif dès l'apparition de fissures dans le gel ou de dégradation du tissu.
- Ne pas froter et laisser sécher à l'air libre.

COMPOSITION : 85 % silicone, 15 % tissu polyamide/élasthanne.

En cas de douleurs ou de toute autre réaction inhabituelle, contacter votre médecin. Tout incident grave survenu en rapport avec le produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de santé.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2006.



Lavable à la main.



Pas de chlorage.



Pas de repassage, ni de vapeur.



Pas de séchage en machine.



Pas de nettoyage à sec.

LOT

Voir emballage.