

PROTECTIONS MALLEOLES SPORT EPITHELIUMTACT 04

epitact®
SPORT

MALLEOLAR PROTECTORS / KNÖCHELSCHUTZ / PROTEZIONI PER
MALLEOLI / PROTEÇÕES PARA OS MALÉOLOS / ENKELBESCHERMERS /
PROTECCIONES PARA MALÉOLOS/ BESKYTTELSE TIL ANKELKNUDER/
FOTKNÖLSSKYDD / KEHRÄSLUUN SUOJAT / ANKELPLASTER / ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
ΑΣΤΡΑΓΑΛΩΝ



MILLET
INNOVATION



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Loriol/Drôme - FRANCE

contact@epitact.com
www.epitact.com

PROTECTIONS MALLÉOLES

EPITHELIUMTACT 04

INDICATIONS :

Les protections malléoles EPITHELIUMTACT 04 sont constituées d'un gel de silicone auto-adhésif de 2 mm d'épaisseur dont les propriétés viscoélastiques sont proches de celles de la peau. Appliquées sur les malléoles en contact direct avec la peau, les protections vont répartir les pressions et absorber les frictions par dissipation de l'énergie dans le gel et ainsi prévenir tout risque d'échauffements. Elles soulagent aussi la douleur permettant ainsi de continuer la pratique sportive tout en restant performant. Le contact avec la peau est très agréable, la protection se décolle sans douleur même sur les zones pileuses.

CONTRE-INDICATIONS :

- Ne pas utiliser sur une plaie non protégée.
- Cas des personnes souffrant d'artérite, de diabète, de polyneuropathie, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères variqueux : ne jamais utiliser le produit directement sur une plaie, un mal perforant, surveiller le pied pendant l'utilisation et dans tous les cas demander conseil à votre médecin ou podologue.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Les Protections EPITHELIUMTACT 04 ont été spécialement conçues pour couvrir parfaitement les zones sensibles (malléoles, scaphoïdes).

- Enlever le film de protection transparent (ne pas essayer de décoller le tissu).
- Appliquer la protection sur la zone à protéger, directement sur la peau. Vous pouvez l'enlever et la repositionner sans restriction.
- De préférence, faire remonter une chaussette par-dessus.
- Déposer la protection sur l'étui de rangement prévu à cet effet et la placer dans le sachet métallisé jusqu'à la prochaine utilisation. :

ENTRETIEN :

- Laver après utilisation. Les protections sont lavables à l'eau et au savon.
- Jeter et remplacer le dispositif dès l'apparition de fissures dans le gel ou de dégradation du tissu.
- Ne pas froter et laisser sécher à l'air libre.

COMPOSITION : 91 % silicone, 9 % tissu polyamide/élasthanne.

En cas de douleurs ou de toute autre réaction inhabituelle, contacter votre médecin. Tout incident grave survenu en rapport avec le produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de santé.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2014.



Lavable à la main.



Pas de repassage, ni de vapeur.



Pas de nettoyage à sec.



Pas de chlorage.




Pas de séchage en machine.

LOT

Voir emballage.

PREVENTIVE PROTECTORS

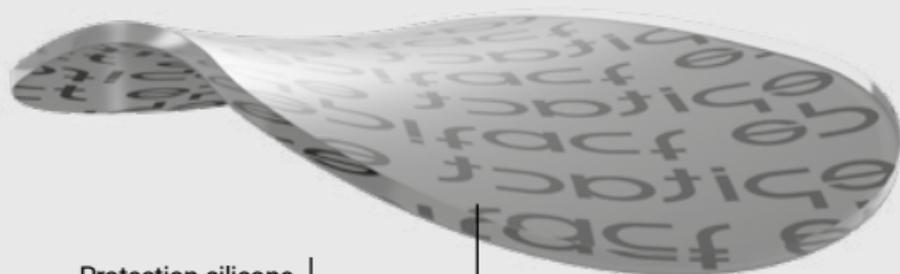

Protection silicone
EPITHELIUMTACT
lavable et réutilisable

EPITHELIUMTACT
silicone protector
washable and reusable

RÉPARTITION DES PRESSIONS ET DES FROTTEMENTS

DISTRIBUTION OF PRESSURE AND FRICTION

19371-G • 05/2023

**DÉCOUVREZ
LA GAMME EPITACT® SPORT
DISCOVER
THE EPITACT® SPORT RANGE**

www.epitact.com

Produit issu de la recherche MILLET Innovation.
Product designed by MILLET Innovation R&D.



FR

