

## PROTECTION CONFORT BASE DU PETIT ORTEIL QUINTUS VARUS



### ÉLIMINE LES FROTTEMENTS

Pastille EN SILICONE  
EPITHELIUM 26®  
1 mm d'épaisseur :  
encombrement  
minimal  
dans la chaussure.



#### INDICATIONS :

Le port de la protection confort quintus varus permet de soulager les douleurs liées aux pressions et frottements sur la bosse du quintus varus (déformation de l'articulation à la base du petit orteil).

#### CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas utiliser sur plaie non protégée. Cas des personnes souffrant d'artérite, de diabète, de polynévrite, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères : demandez conseil à votre médecin ou à votre podologue, puis surveillez votre pied pendant l'utilisation.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Laver avant la 1<sup>ère</sup> utilisation. La protection doit se porter à même la peau. Glisser le pied dans la protection en passant le gros orteil dans la partie tubulaire. Le module de gel d'Epithelium 26® doit se trouver au niveau du quintus varus. Pour un maintien optimal, ne pas porter pieds nus mais avec un collant, un bas ou une chaussette par-dessus.

#### SPÉCIFICITÉS :

La protection confort quintus varus a été pensée pour vous soulager efficacement sans gêner vos mouvements. Grâce à son tissu technique très fin

et résistant associé à une pastille de silicone, elle prévient les pressions sans créer de gêne dans vos chaussures et elle se fait complètement oublier au cours de votre journée.

#### ERGONOMIE :

Peu encombrante, la protection se porte dans vos chaussures habituelles.

**DURÉE DE VIE :** Lavable en machine dans le filet de lavage fourni, elle a une longue durée d'utilisation (plusieurs mois).

**ENTRETIEN :** Laver après utilisation en machine à 30°C dans le filet de lavage fourni ou à la main (sans frotter). Jeter et remplacer le dispositif dès l'apparition de dégradation du tissu ou des coutures.

**COMPOSITION :** 92% tissu polyamide / élasthanne, 8% silicone.

En cas de douleurs ou de toute autre réaction inhabituelle, contacter votre médecin. Tout incident grave survenu en rapport avec le produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de santé.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Marquage CE initial : 2024.



Lavable en machine à 30°C



Pas de repassage, ni de vapeur.



Pas de nettoyage à sec.



Pas de chlorage.



Pas de séchage en machine.



LOT Voir emballage.

Produit issu de la recherche MILLET Innovation.



MILLET Innovation ZA Champgrand  
26270 Lorio/Drôme - FRANCE

MILLET  
INNOVATION

www.epitact.com