

POSTUROSTRAP™

CORRECTEUR DE POSTURE

INDICATIONS : POSTUROSTRAP™ soulage et contribue à la prévention de vos troubles musculo-squelettiques dorsaux, lors de vos activités quotidiennes.

CONTRE-INDICATIONS : Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas appliquer de crème/gel/baume sur les zones de contact peau/dispositif.
- Avant utilisation, ajuster la taille des plaquettes si nécessaire (voir cartoulette), enlever le film protecteur sur leur face adhésive et les positionner dans les « bonnets » situés sur l'élastique.

SPÉCIFICITÉS : Grâce à 2 plaquettes semi-rigides, adhésives, positionnées sur les muscles de part et d'autre de votre colonne vertébrale, ce dispositif favorise la stimulation des récepteurs cutanés (proprioception). Sans entraver vos mouvements, il contribue à vous stabiliser et à vous redresser par une prise de conscience de la position de votre dos dans l'espace.

ERGONOMIE : POSTUROSTRAP™ s'adapte à toutes les morphologies. Très fin et confortable, il préserve votre liberté de mouvements et vous permet de réaliser toutes vos activités quotidiennes. Discret, il se porte sous tous les vêtements. Pour les femmes, la partie haute du dispositif se place, à votre convenance, sur ou sous la fermeture du soutien-gorge. POSTUROSTRAP™ ne comprime ni le ventre, ni la cage thoracique pour concentrer son action sur votre dos.

TENUE ET ENTRETIEN : Laver le dispositif 2 fois par semaine, à la main sans frotter, avec de l'eau savonneuse, pour favoriser le maintien sur la peau. Ne pas laver en machine. Laisser sécher naturellement et ne pas repasser.

COMPOSITION : Textile (Polyamide, Elasthanne, Polyuréthane), Plastique thermoformable, Silicone, Métal.

Les matériaux ont fait l'objet d'une évaluation de la biocompatibilité selon la norme ISO 10 993-1 concernant les produits venant en contact avec la peau. Si néanmoins, un incident se produisait, il conviendrait de cesser immédiatement l'utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation. La responsabilité de MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2021.



Made in France



Lavable à la main.



Pas de repassage, ni vapeur.



Pas de chlorage.



Pas de nettoyage à sec.



Voir emballage.



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Loriol/Drôme - FRANCE

MILLET
INNOVATION

www.epitact.com

N19590-A-FR
01/2021