

ORTHÈSE POIGNET POUCE RIGIDE DE REPOS QUERV'IMMO™



IMMOBILISE ET SOULAGE LE POUCE ET LE POIGNET



INDICATIONS :

Durant la nuit ou dans toutes les situations où vous n'utilisez pas votre main, le port régulier de l'orthèse de repos QUERV'IMMO™ est préconisé en cas de ténosynovite de De Quervain, de tendinite, d'entorse bénigne, d'inflammation et de troubles musculo-squelettiques du pouce et du poignet.

CONTRE-INDICATIONS :

L'orthèse ne doit pas être mise en contact avec une lésion cutanée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de la réglementation le marquage CE. En cas de doute, prenez conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien ou tout autre professionnel compétent.

SPÉCIFICITÉS :

Très légère, l'orthèse EPITACT® s'adapte à votre pouce et à votre poignet pour les maintenir confortablement en position de repos grâce à ses renforts anatomiques semi-rigides. Le passage de la sangle de serrage a été optimisé de façon à apporter un ajustement homogène de l'orthèse autour de votre poignet tout en évitant les surpressions.

ERGONOMIE :

Grâce à ses renforts développés pour s'adapter parfaitement à la morphologie de votre main, l'orthèse QUERV'IMMO™ vous offre un confort optimal. Légère et ultrafine, elle se fait oublier lorsque vous la portez même pendant le sommeil. L'orthèse s'ouvre largement pour faciliter le passage de la main et le serrage autour du pouce est adaptable.

ENTRETIEN :

Lavage à la main à 30°C, avec un savon non agressif sans détergent ni eau de javel. Bien rincer. Essorer par pression. Ne pas exposer au séchage à une source de chaleur directe (radiateur, rayons de soleil). Ne pas utiliser de détachant.

COMPOSITION : 52% Tissu (Polyamide, Elasthanne, Polyuréthane), 46% Elastomère thermoplastique (TPE), 2% Métal.

Les matériaux ont fait l'objet d'une évaluation de la biocompatibilité selon la norme ISO 10993-1. Si un incident se produisait, il conviendrait de cesser immédiatement l'utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation. La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2021.



Lavable à la main.



Pas de repassage, ni de vapeur.



Pas de nettoyage à sec.



Pas de chlorage.



Pas de séchage en machine.



Voir emballage.

Produit issu de la recherche MILLET Innovation.



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Lorioi/Drôme - FRANCE

MILLET
INNOVATION

www.epitact.com